

平成 21 年 6 月吉日

お客様各位

株式会社タマツ

## リハビリバー専用 すき間防止スペーサー発売のお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様ご承知のとおり、今年 3 月経済産業省より〔JIS T 9254〕在宅用電動介護ベッドの規格改定が行われました。その内容を考慮し、リハビリバーとヘッドボードのすき間をうめる為に、『すき間防止スペーサー』を 6 月末日に発売いたします。

お客様におかれましては、ご利用の皆様がより安全に過されませう是非お求め下さい。

合わせて製品の取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読み頂き、より安全にご利用下さりますようお願い申し上げます。

謹白

### リハビリバー専用 すき間防止スペーサー



#### 〔取付方法〕

リハビリバー（柵 1）の上方から下方にスペーサーをはめ込みます。

ヘッドボードとのすき間をうめるよう調節してください。（調節幅 90mm）

備え付けの六角ボルトで 3 箇所を締め付けます。

がたつきがないか確認してお使い下さい。

#### 〔注意事項〕

スペーサーに過剰に力をかけないでお使い下さい。

ヘッドボードと干渉する場合は使用をお控え下さい。

#### 〔詳細〕

材質：スチール（粉体塗装仕上げ）

販売金額：8,400 円（税込）

ご不明な点ありましたらご連絡下さい

株式会社タマツ TEL.(0235)23-6333 FAX.(0235)25-3889

URL <http://www.tamatsu.jp> e-meil [info@tamatsu.jp](mailto:info@tamatsu.jp)